


Návod na použití samotestu SARS-CoV-2 LEPU

Použití

- Odeberte vzorek pomocí výtěrové tyčinky:
- Zcela zasuňte hlavičku výtěrové tyčinky do nosní dírky a 5x jemně otočte. Stejným způsobem odeberte vzorek z druhé nosní dírky – stejnou výtěrovou tyčinkou – aby se zajistilo **dostatečné množství vzorku**.
- Protáhněte výtěrovou tyčinku se vzorkem jamkou B do jamky A a přidejte 6 kapek pufru do jamky A.




- Tyčinku dvakrát otočte ve směru a proti směru hodinových ručiček.
- Odstraňte ochranný kryt fixačního lepidla. Splete levou a pravou stranu k sobě a vyčkejte 15 minut.

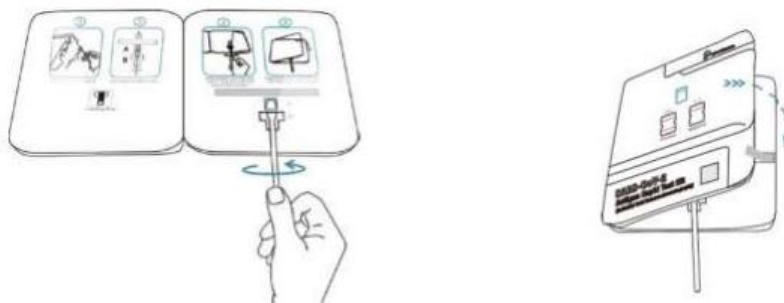

Výsledek testu odečtěte za 15 minut


Pozitivní
(+)

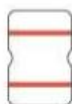

Negativní
(-)



Neplatný

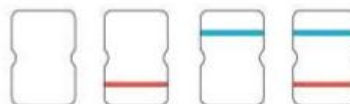

Instruktažní video:

<https://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78>